

# ケンエー

## オートディスペンサーSK

### 取扱説明書

この取り扱い説明書をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

#### 安全上の注意



#### 警告

取り扱いを誤ると、死亡または重症などを負う可能性があります

- ・アルコール製剤を使用する場合は、火気のある場所や高温の場所あるいは換気の悪い場所での使用は火災の原因になる恐れがありますので、このような場所では使用しないでください。
- ・アルコール製剤を使用する場合は、薬液で濡れた手で暖房機など火気のあるものに触れないでください。引火する恐れがあります。
- ・本品に使用する薬剤の添付文書や製品表示内容などを必ずお読みください。誤った使用は大変危険です。
- ・薬液は絶対に飲まないでください。また本品は手指の消毒および洗浄以外の目的に使用しないでください。健康を害する恐れがあります。
- ・本品を下からのぞかないでください。センサー部が感知した場合、本品が作動し、薬液が目などに噴出される恐れがあります。
- ・万一、発煙・発熱・異臭などの異常が発生した場合は、直ちに電源スイッチをお切りください。火災や感電事故の原因となることがあります。
- ・乾電池から液漏れが生じた場合は、その液体には絶対に触らないでください。皮膚障害の原因となることがあります。



#### 注意


取り扱いを誤ると、重症または物的損害が発生する可能性があります

- ・薬液噴出中は本品に触れないでください。駆動部に指が挟まれるなど、ケガの原因となる恐れがあります。
- ・薬剤の交換やステージ高さの変更は、必ず電源を切ってから行ってください。薬剤の交換中やステージ高さ変更中に作動して不要な噴出や事故の原因となる恐れがあります。
- ・本品は安定した場所でご使用ください。不安定な場所での使用は転倒などの原因となることがあります。
- ・水のかかる場所や結露の発生する場所では使用しないでください。故障の原因となることがあります。
- ・乾電池を交換する場合は、全て同一の新しい乾電池（単二アルカリ乾電池）に交換してください。新旧の混在や性能の異なる乾電池の併用は、乾電池からの液漏れや短寿命の原因となることがあります。
- ・薬剤の交換や使用時などに薬液が壁や床などに付着した場合は、変色などの恐れがありますので、直ちに拭き取ってください。



健栄製薬

# 各部の名称

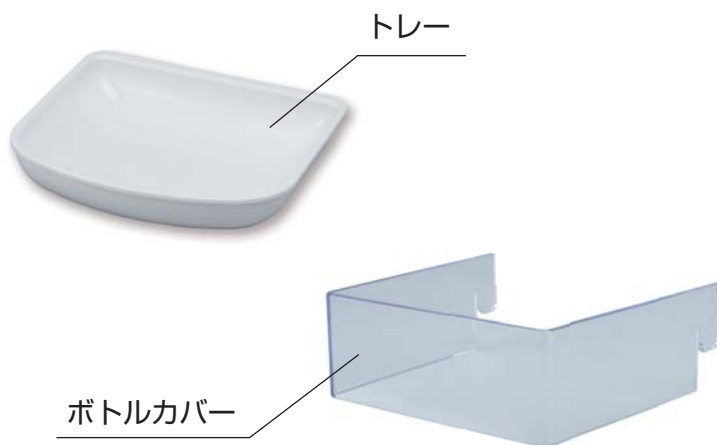

## ケンエーオートディスペンサー SKの特長

- ・手を差し出すだけの「非接触式」なので、衛生的に使用できます。
- ・薬液は容器ごと交換するので、薬液を移し換える手間がかかりません。
- ・薬剤を取り付けるステージ高さが変更できるので、様々な容量の製品に使用することができます。
- ・乾電池駆動式なので、自由にどこにでも設置できます。ポールに固定する場合にはポールスタンドを準備しています。
- ・使用頻度が多い場合には「ACアダプター」を準備しています。
- ・パワーセーブ機能により、待機時の消費電力を抑えることができます。
- ・センサー部には外乱光による誤作動や感度低下を低減する専用ICを採用しています。

\* 本品を開梱する際には以下の内容物が同封されていることをご確認ください。

- ・ディスペンサー本体 1台 ・ボトルカバー 1個 ・トレー 1枚 ・乾電池（単二アルカリ乾電池）4本

## 使用準備と薬剤の取り付け

### 使用準備（乾電池使用）

1. 電源スイッチが切れて（OFF）いることを確認してください。
2. 本体の電池カバーを開け、付属の乾電池4本を電池ボックスの表示に従って装着し、電池カバーを閉じてください。

### 使用準備（ACアダプター使用）

1. 電源スイッチが切れて（OFF）いることを確認してください。
2. 指定のACアダプター（DC6V）をDCジャックに差し込んでください。

### \* ACアダプターの使用上の注意


- ・指定のACアダプター（DC6V）を使用してください。
- ・ACアダプターの使用時は、必ず乾電池を取り外してください。乾電池を取り外していない状態でACアダプターを使用されますと乾電池の液漏れが発生する恐れがあります。
- ・ACアダプターのコードは「引っ掛け」などによる転倒、断線、歩行障害などを引き起こすことがありますので、コードがたるんでいる場合は、しっかり固定または結束してご使用ください。

### 薬剤の取り付け

1. オートディスペンサー本体のステージ固定用ネジを緩め、ステージは水平な状態を保ちつつ、ステージとステージレバーをつかみ、ステージレバーを引き上げながら、薬剤の種類・容量に応じたステージ高さ（次項参照）に設定してください。ステージ高さ設定後、ステージ固定用ネジを締めてください。
2. 使用する薬剤にポンプを取り付け、オートディスペンサー本体のポンプアームに薬剤のポンプヘッドを合わせ、ステージ奥まで薬剤を押し込み、取り付けてください。
3. 薬剤のポンプノズルが正面に来るように調整してください。
4. ボトルカバーをオートディスペンサー本体に取り付けてください。
5. トレーをオートディスペンサー本体に取り付けてください。
6. 電源スイッチを入れて（ON）薬液が噴出されるまで数回作動させてください。

▼ステージ高さ調整時のイメージ



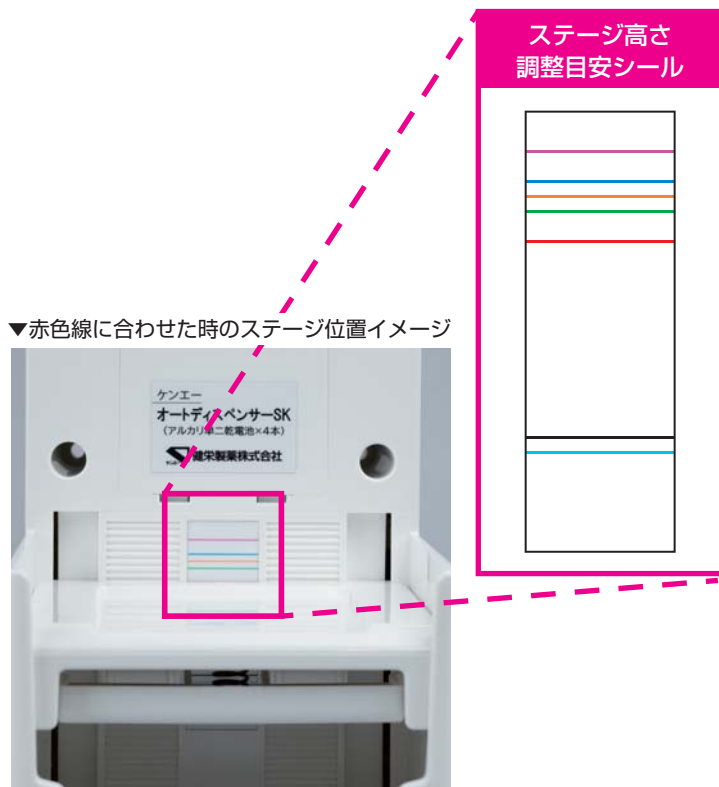

▼赤色線に合わせた時のステージ位置イメージ

ステージ高さ調整目安シール 目安線の対応製品一覧

—	ラビジェル (A)	500mL
—	ステリクロンスクラブフォーム	500mL
	手ピカハンドソープ	500mL
	手ピカジェルP (ショートノズル)	500mL
—	ステリクロンハンドローション	500mL
	ラビショット (A)	500mL
	手ピカローションP	500mL
—	ラビネット	500mL
	ポビドンヨードスクラブ液	500mL
	ステリクロンスクラブ液	500mL
—	消毒用エタプラス	500mL
	エタプラスゲル (A)	500mL
	手ピカジェルP	500mL
—	ステリクロンハンドローション	1000mL
	ステリクロンスクラブ液	1000mL
	ラビショット (A)	1000mL
—	手ピカローションP	1000mL
	ラビネット	1000mL
	消毒用エタプラス	1000mL

### 【注 意】

- ・ステージの高さ調整は、必ずステージ固定用ネジを緩めた後に、ステージとステージレバーをつかみ、ステージレバーを引き上げながら行ってください。無理に動かそうとすると、故障の原因になることがあります。  
※ステージが動かしにくい場合、ステージとステージレバーを引き上げながら、ステージ奥部分にも移動したい方向へ力をかけながら動かすと、ステージが動かしやすくなる場合があります。
- ・ステージ位置を設定後、ステージ固定用ネジは確実に締めてください。ネジが緩い場合は、薬液噴出時にステージの高さが変わり、正しく噴出されない原因となることがあります。
- ・乾電池および薬剤の取り付けは、必ず電源スイッチが切れて (OFF) いる状態で行ってください。
- ・乾電池の取り付け方向を間違えると、乾電池の液漏れや発熱の原因となります。
- ・乾電池は必ず同一の新しい乾電池 (単二アルカリ乾電池) を使用してください。

## 使用方法

1. 電源スイッチを入れて (ON) ください。
2. 手をノズルの下に差し出すと、ステータスランプが緑色に点灯し、薬液が噴出されます。この時、両手で受け止めてください。片手で受けると薬液がこぼれることがあります。  
▶ 続けて使用する場合は、1度手をノズルの下から離し、ステータスランプが消灯してから再度手をノズルの下に差し出してください。  
※ 1度の感知で2回噴出するように設定を変更することもできます。(詳しくは弊社MRIにご相談ください)。

### 【使用上の注意】

- ・アルコール製剤を使用する場合は、火気のある場所や高温の場所あるいは換気の悪い場所では使用しないでください。
- ・アルコール製剤を使用する場合は、薬液で塗れた手で暖房機など火気のあるものに触れないでください。
- ・本品に使用する薬剤の添付文書や製品表示内容などを必ずお読みください。
- ・センサー部には赤外線を利用しています。光の性質上、本品の前に反射物を置かれますと誤作動の原因となることがあります。

- ・ 長期間使用しない場合は、乾電池を取り外した状態、またはACアダプターを取り外した状態で保管してください。
- ・ 電源スイッチを入れた（ON）まま本体を持ち上げたり、移動させたりしないでください。
- ・ 本品は、指定の薬剤以外では使用しないでください。故障の原因になります。

## 薬剤の交換

---

1. 本体の電源スイッチが切れて（OFF）いることを確認してください。
2. 薬剤を手前に引き、ステージから取り外してください。
3. 薬剤の取り付けの項に従って、薬剤を取り付けてください。

### 【薬剤の交換上の注意】

- ・ 薬剤の交換は、必ず電源スイッチが切れて（OFF）いる状態で行ってください。
- ・ 薬剤交換時に、残っている薬液が噴出されることがあるので注意してください。

## 乾電池の交換

---

ステータスランプが赤く点滅し始めますと、乾電池の交換時期です。以下の手順に従って乾電池を交換してください。

1. 本体の電源スイッチが切れて（OFF）いることを確認してください。
2. 薬剤を手前に引き、ステージから取り外してください。
3. 電池カバーを開けて古い乾電池を取り外してください。
4. 同一の新しい乾電池（単ニアルカリ乾電池）4本を電池ボックスの表示に従い、向きに注意して装着してください。
5. 電池カバーを閉じ、薬剤の取り付けの項に従って薬剤を取り付けてください。

### 【乾電池の交換上の注意】

- ・ 乾電池の交換は、必ず電源スイッチが切れて（OFF）いる状態で行ってください。
- ・ 乾電池の取り付け方向を間違えると、乾電池の液漏れや発熱の原因となります。
- ・ 乾電池は必ず同一の新しい乾電池（単ニアルカリ乾電池）を使用してください。



## ◆故障と思われる時に（トラブルシュート）

現象	原因	処置
作動しない	電源スイッチが（ON）になっていますか？	電源スイッチを（ON）にしてください。
	ACアダプターがコンセントから外れていませんか？	ACアダプターをコンセントに差し込んでください。
	ACアダプターのプラグがDCジャックから外れていませんか？	ACアダプターのプラグをDCジャックに差し込んでください。
	乾電池が消耗していませんか？	乾電池が消耗しすぎると、乾電池交換表示（ステータスランプが赤色で点滅点灯）もしなくなります。
	センサー部が常時検出（ステータスランプが緑色に点灯）していませんか？	センサー部にノズルや反射物があると、誤作動や作動不良の原因となります。
	手の位置は適切ですか？	両手をノズルの下に差し込んでください。
	乾電池の取り付け極性（+-）は正しいですか？	乾電池は電池ボックスに表示されている向きに従って取り付けてください。
途中で止まる	乾電池が消耗していませんか？	乾電池を交換してください。
作動が遅い	乾電池が消耗していませんか？	乾電池を交換してください。
作動し続ける	センサー部のそばにノズルや反射物がありますか？	センサー感知エリア内にカーテンなどの布類及び鏡や金属などの反射物があると誤作動の原因となります。
	センサー部に直射日光や強い白熱電球などの光が当たっていませんか？	日光や電球からの赤外線の影響により、センサーが誤作動することがあります。設置場所を移動してください。
連続で作動する	本品は1回の検知での噴出回数を1回または2回に設定することができます。	噴出回数の設定につきましては弊社MRまでお尋ねください。
薬液が正常に噴出されない	薬液が少なくなっていますか？	新しい薬剤と交換してください。
	ステージ高さは適切な高さに設定されていますか？	取扱説明書を確認し、薬剤の種類・容量に応じたステージ高さに設定してください。
ステータスランプが赤色に点滅している	電池交換のサインです。なおステータスランプが赤色に点滅している時でも作動しますが、作動時にステータスランプが赤色に点灯します。	同一の新しい乾電池（単二アルカリ乾電池×4本）と交換してください。
乾電池を交換したが作動しない	乾電池の極性（+-）は正しいですか？	電池ボックスの表示通りに、+と-の向きに注意しながら乾電池を装着してください。
乾電池の寿命が短い	「アルカリ」乾電池を使用していますか？	「マンガン」乾電池を使用すると、乾電池の寿命が短くなります。

◎いずれの場合もあてはまらない場合には弊社までご連絡ください。

# 仕 様

品 名	ケンエーオートディスペンサー SK
使用薬剤	弊社指定の薬剤
使用電源	単ニアルカリ乾電池×4本 又は ACアダプター (オプション)
外形寸法 (mm)	350 [H]・140 [W]・290 [D] (トレイ装着時)
製品重量	約0.9kg (薬液、乾電池含まず)
材 質	本体：ABS ボトルカバー：PMMA トレー：PP



ケンエー

## 健栄製薬株式会社

大阪府中央区伏見町2丁目5番8号  
電話番号 06(6231)5822