

高温処理済
コンタクト
レンズ用

精製水

500 mL

Purified Water



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号
電話番号 06(6231)5822

コンタクトレンズ用精製水

MC

本品はイオン交換、逆浸透又は限外ろ過などを単独あるいは組み合わせて精製した水を高温処理したものです。

用途

溶解剤としてコンタクトレンズの洗浄液、保存液の調製に用います。

 使用上の注意

- 1) コンタクトレンズ装着液としては用いないでください。
 - 2) ソフトコンタクトレンズの洗浄及び保存には、そのまま使用しないでください。(レンズが変形する可能性があります。)
 - 3) 調製した洗浄液、保存液の使用に際しては、ソフトコンタクトレンズの場合、保存(調製)液でよくすすぎ、規定通り必ず煮沸消毒してから装着してください。(酸素透過性ハードレンズの場合、煮沸消毒は不要です。)
 - 4) 液を取り出したあとは直ちに密栓し、開口状態で放置しないでください。
 - 5) 一度取り出した液を元の容器に戻さないでください。
 - 6) 開封後はなるべく速やかに使用してください。
 - 7) 容器の先が、人指等に触れると、雑菌等のため、液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。又、におい、混濁、沈殿が生じたものは使用しないでください。
- 保管上の注意
- 1) 直射日光をさけてください。
 - 2) なるべく冷所(冷蔵庫等)に密栓して保管してください。
 - 3) 他の容器に入れかえないでください。



キャップ: PE
ボトル: PE
外装フィルム: PE, PP

製造
番号
使用
期限