

コンタクトレンズ用

精製水

高温処理済

Purified Water

本品はイオン交換、逆浸透又は限外ろ過などを単独あるいは組み合わせて精製した水を高温処理したものです。

【用途】
【使用上の注意】



- 1) コンタクトレンズ装着液としては用いないでください。
- 2) ソフトコンタクトレンズの洗浄及び保存には、このまま使用しないでください。(レンズが変形する可能性があります。)
- 3) 調製した洗浄液、保存液の使用に際しては、ソフトコンタクトレンズの場合、保存(調製)液でよくすすぎ、規定通り必ず煮沸消毒してから装用してください。(酸素透過性ハードレンズの場合、煮沸消毒は不要です。)
- 4) 液を取り出したあとは直ちに密栓し、開口状態で放置しないでください。
- 5) 一度取り出した液を元の容器に戻さないでください。
- 6) 開封後はなるべく速やかに使用してください。
- 7) 容器の先が、人指等に触れると、雑菌等のため、液が汚染又は混濁することがありますので注意してください。又、におい、混濁、沈澱が生じたものは使用しないでください。

【保管上の注意】

- 1) 直射日光をさけてください。
- 2) なるべく冷所(冷蔵庫等)に密栓して保管してください。
- 3) 他の容器に入れかえないでください。

【包装】

500mL